


Funktionen Bildschirmlesegerät «MagniLink Vision BASIC»

1. Bedienfeld

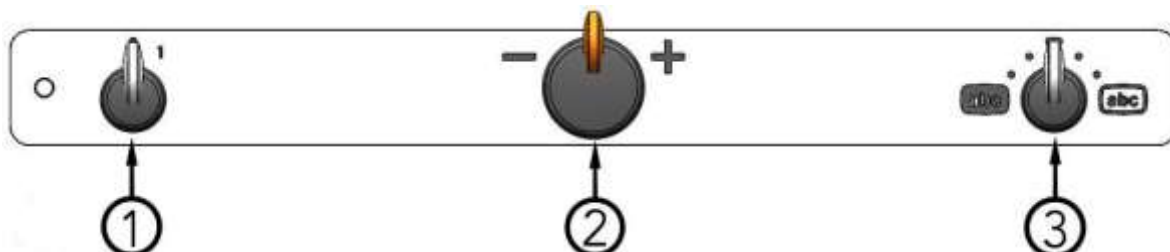

1.1. Hauptschalter Ein/Aus

Drehen Sie diesen Knopf, um das Gerät ein- und auszuschalten.

1.2. Vergrößerungssteuerung


Drehen Sie diesen Knopf nach links, um die Vergrößerung zu verringern oder nach rechts, um die Vergrößerung zu erhöhen. Mit diesem Knopf kann die Vergrößerung auf 16 verschiedene Stufen eingestellt werden.

1.3. Farbbildmodus und kontrastreicher Modus

Wenn sich der Knopf in der vertikalen Startstellung befindet, wird das Farbbild mit natürlichen Farben auf dem Bildschirm angezeigt. Drehen Sie den Knopf nach links, um in den negativ kontrastreichen Modus, und nach rechts, um in den positiv kontrastreichen Modus zu gelangen. In der Standardeinstellung gibt es vier Kombinationen:

Hintergrund/Text	Hintergrund/Text
Weiss/Schwarz	Gelb/Schwarz
Schwarz/Weiss	Scharz/Gelb

2. Lesetisch

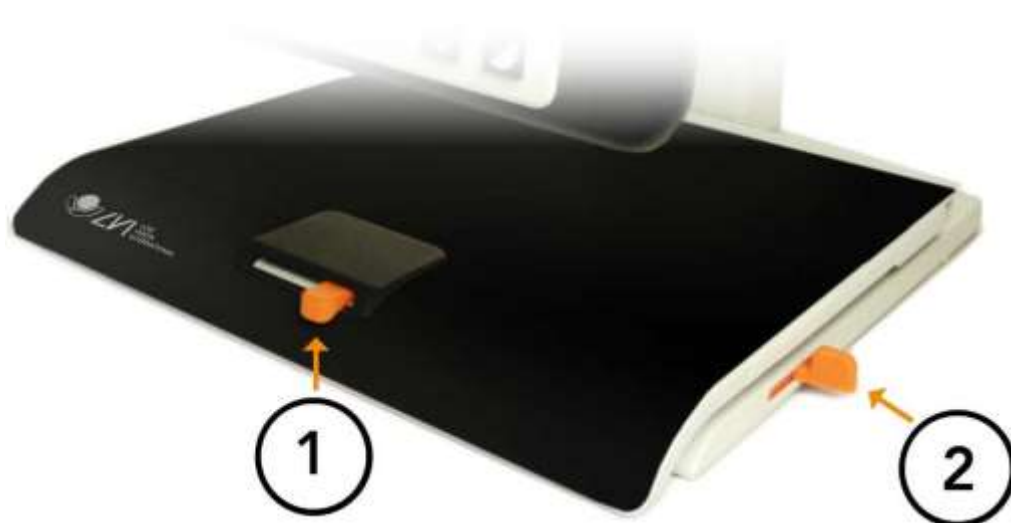

2.1. Seitenbremse

Stellen Sie den seitlichen Bremswiderstand ein, indem Sie diesen Griff bewegen. Befindet sich die Bremse am linken Anschlag, ist der Lesetische nicht festgestellt. Drücken Sie die Seitenbremse nach rechts für mehr Widerstand.

2.2. Tiefenbremse

Stellen Sie die Tiefenbremse ein, indem Sie diesen Griff bewegen. Befindet sich die Bremse am nahen Anschlag, ist der Lesetische nicht festgestellt. Schieben Sie die Tiefenbremse nach hinten für mehr Widerstand.